


# الدليل المرجعي السريع لمزيل الرجفان الخارجي التلقائي BeneHeart C & S Series



2



افتح غطاء مزيل الرجفان (AED).

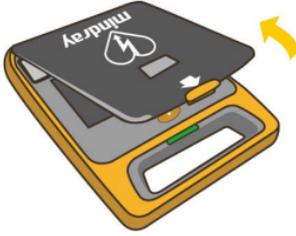

1

تأكد من أن المريض لا يستجيب كما أنه لا يتنفس أو تنفسه غير طبيعي.

**اتصل بخدمة الطوارئ الطبية!**

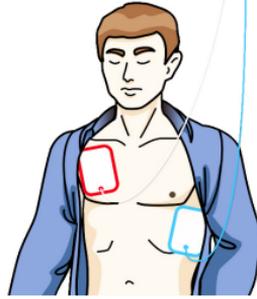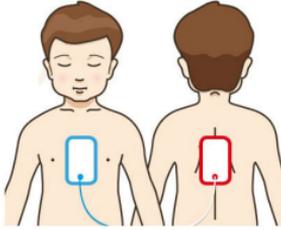

3

ضع الوسائد.

في حال التوصية بإعطاء صدمة



نموذج شبه تلقائي:  
اضغط على زر الصدمة في  
غضون 30 ثانية.

نموذج تلقائي بالكامل:  
يعمل مزيل الرجفان على إعطاء  
المريض صدمة بشكل تلقائي.


4

قم بإعطاء  
صدمة.

في حال عدم التوصية بإعطاء صدمة

قم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي بحسب التعليمات.

**mindray**

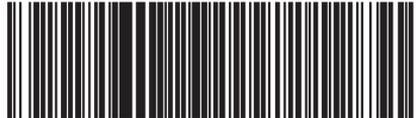

046-017701-00 (2.0)